

クラミジア検査

尿のとり方 Procedure for Taking a Urine Sample

1



出始めの尿を尿検査カップに
1 cm程度とります。

Please use paper cup to collect **initial urine about 1 cm in depth.**

2



試験管のフタを開けます。
中の**液（検査用の薬品）**は**捨てないで**
ください。

捨てた場合は新しい試験管をお渡しします。

Open the test tube.

Please DO NOT throw out the liquid inside. If you disposed of the liquid by mistake, we will provide a new test tube.

3



スポイトで尿検査カップから尿を吸って
ください。

Please draw up the urine sample with the dropper.

4




スポイトの尿を試験管(液入り)に移します。
尿を試験管の**黒い線と線の間**
まで入れてください。
目安：スポイトで約2回ぐらい

Put urine into the test tube using the dropper until the urine level is in-between **upper and lower black lines.**



5

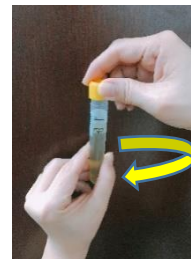

試験管のフタをしっかりと閉め、
ビニール袋に入れます。
採血時にお渡しください。



Close the cap of the test tube tightly, then put it in the plastic bag. Please give the bag to a nurse when you go for your blood test.

6



残った尿をトイレに捨て、使用後の
カップとスポイトは専用ごみ箱に捨て
てください。

Please empty out remaining urine into the toilet.
Throw away the paper cup and the dropper into the trash bin at the entrance of the restroom.

使用後



トイレの手洗い場・
出入口に設置

この後は
待合でお待ちください。

